


OCTA 周辺撮影について


Angiography 撮影画面で内部個視を周辺撮影モードに切り替えて撮影してください。このモードで撮影したデータのみパノラマ作成が可能です。なお、スキャンモードは 9mm、12mm のみです。6mm の OCTA はパノラマモードがありません。




●周辺撮影切り換えボタン.....9x9mm、12x12mm の撮影時にボタンが有効となります。ON に切り換えると以下のボタンが表示され7方向に周辺位置を変更できます。また、ボタン上には各周視位置での撮影回数が表示されます。

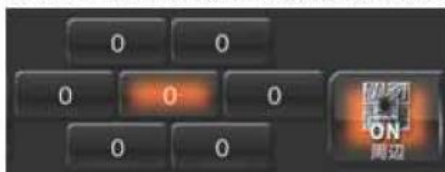


① IMAGEnet6 アイコンをクリックし Angiography データを表示します。

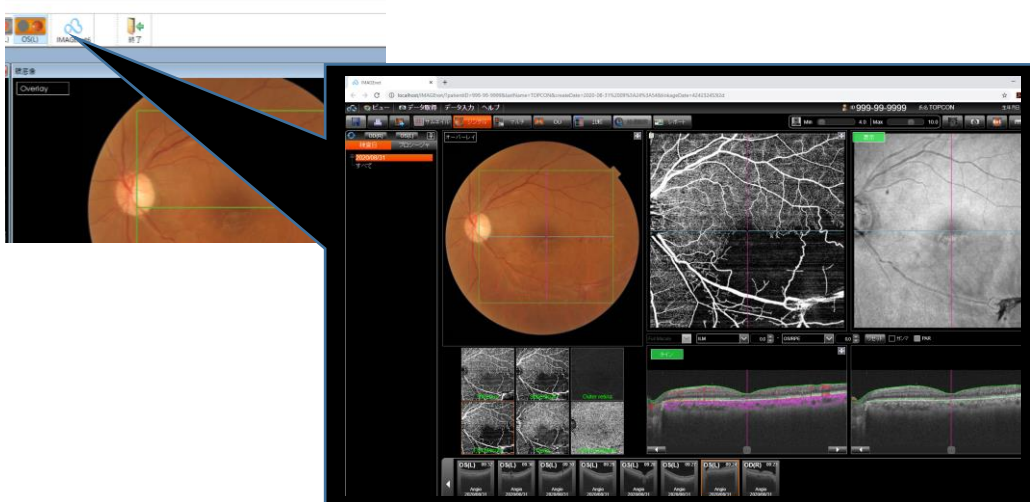


② OCTA-モザイクをクリックします。

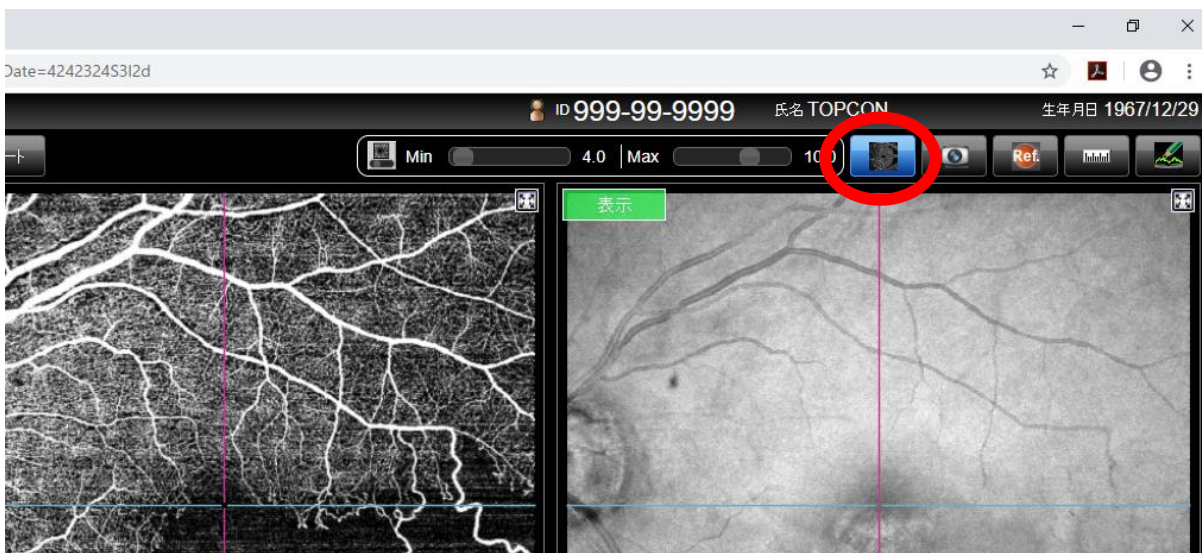

③ 対象の画像が表示されます。マニュアルモザイクをクリックしてください。

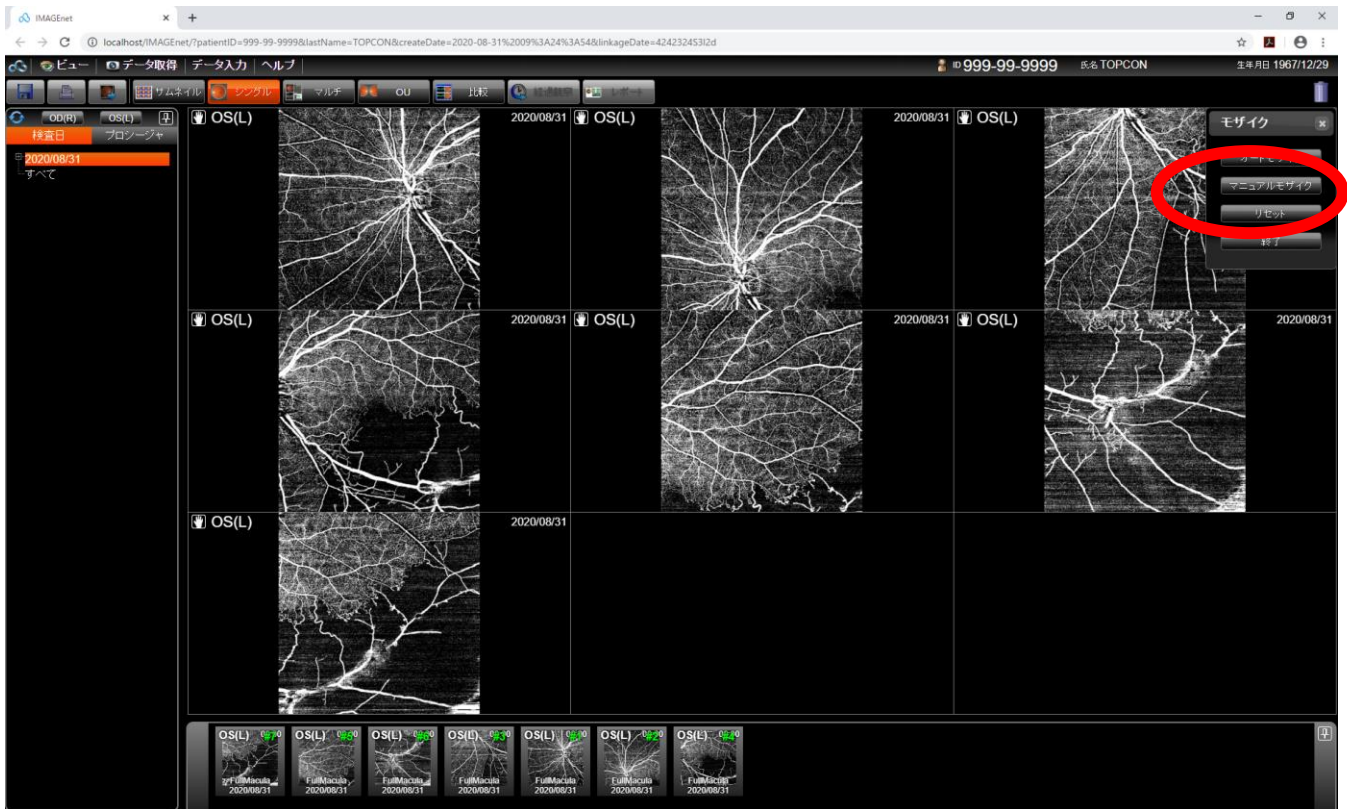

④ モザイク画像が表示されます。マニュアルモードのため、撮影時の内部個視位置に準じて画像が並び変わります。位置修正は画像をドラッグして修正して下さい。

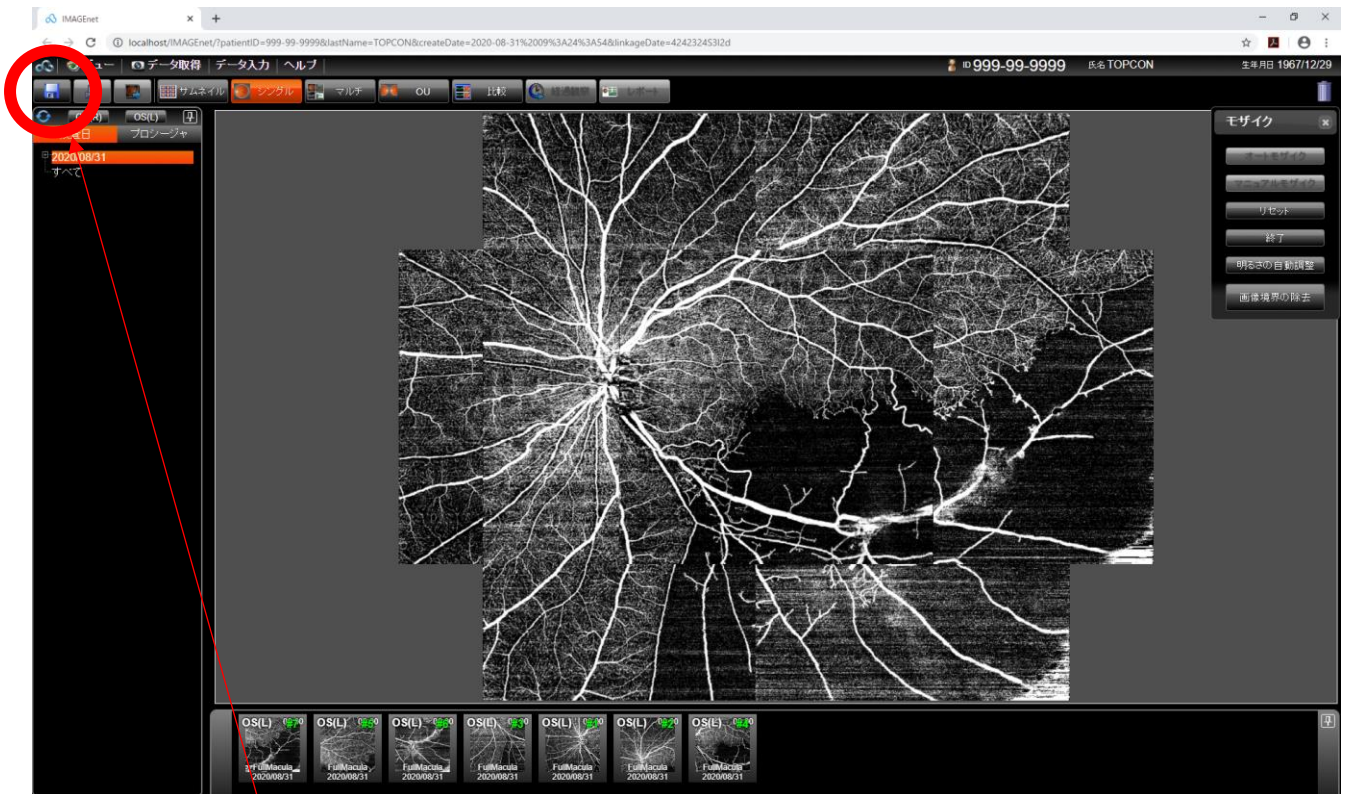

⑤ 修正が終了したら、**保存**をクリックします。1枚の画像に変換されますので、そのまま電子カルテへエクスポートしてください。