



OCT Angio データ処理手順



- ① OCT 本体で撮影モードを選択します。
- ② 手順に従って撮影してください。
- ③ 保存・解析が終了したら、IMAGEnet6 アイコンをクリックし Angiography データを表示します。

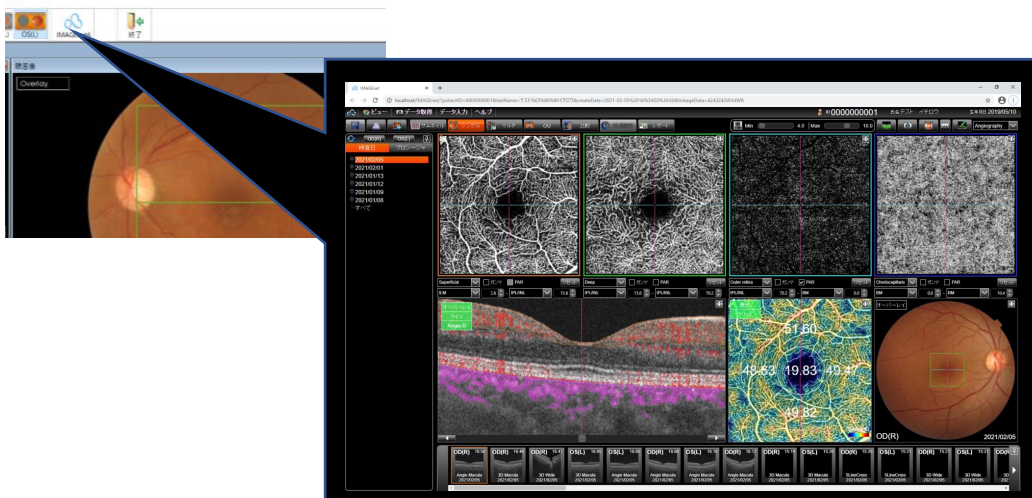

- ④ レポートをクリックしレポートを表示

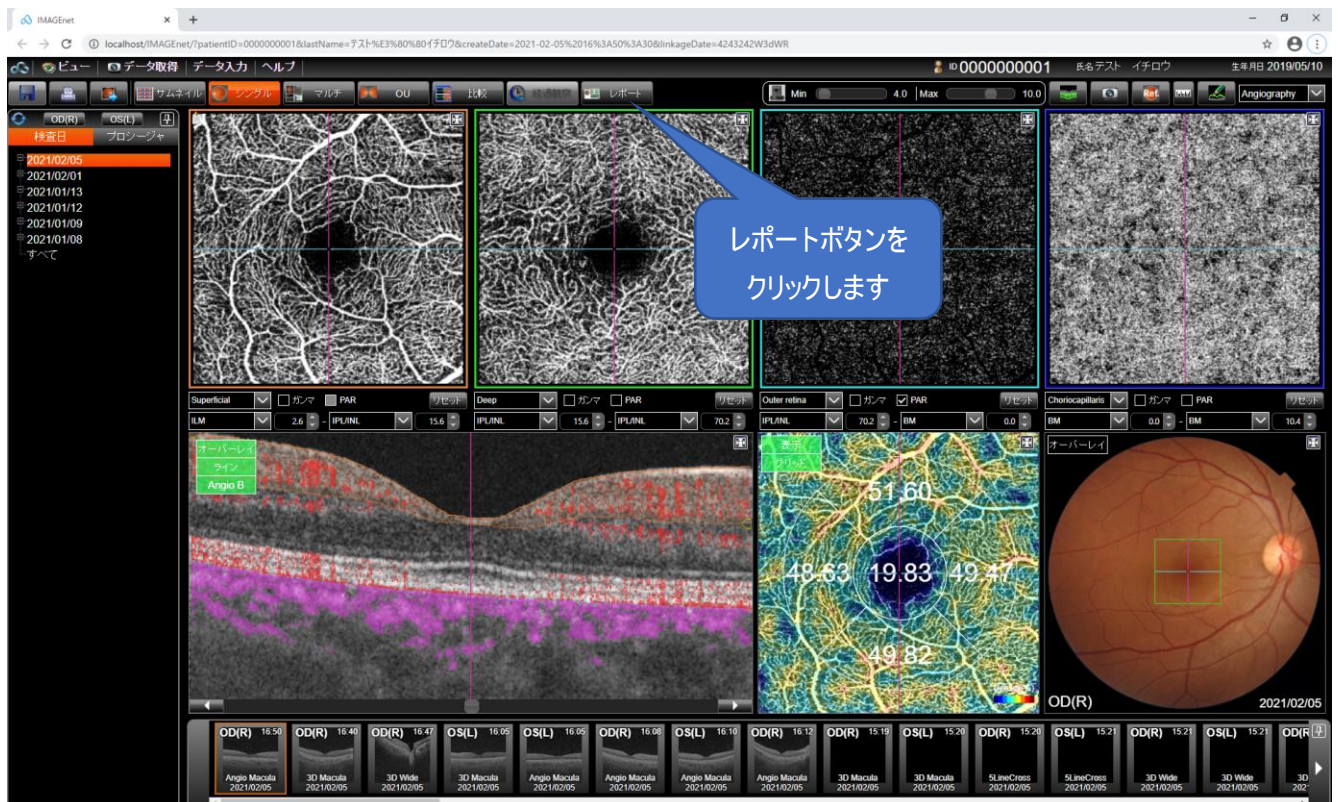


⑤ エクスポートボタンをクリックします。確認画面が表示されたら Image をクリックします。

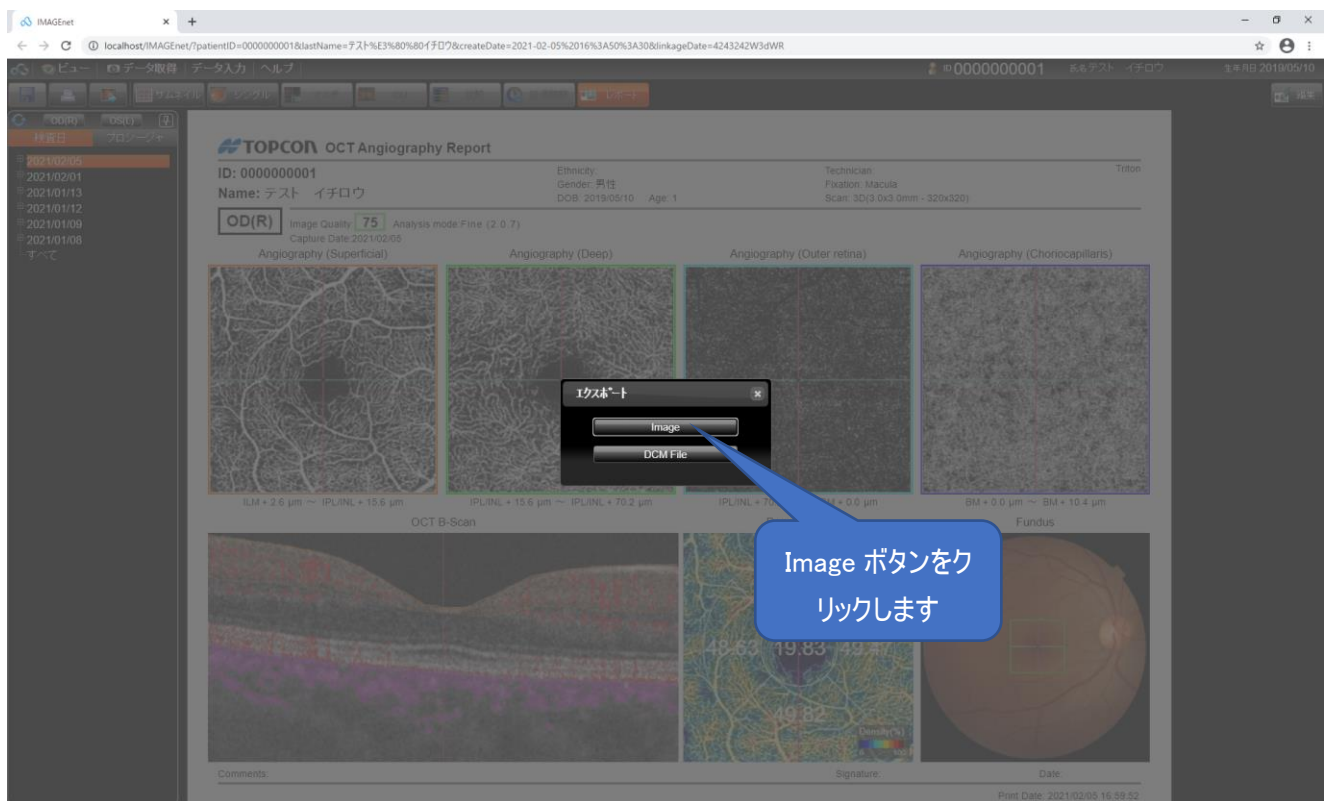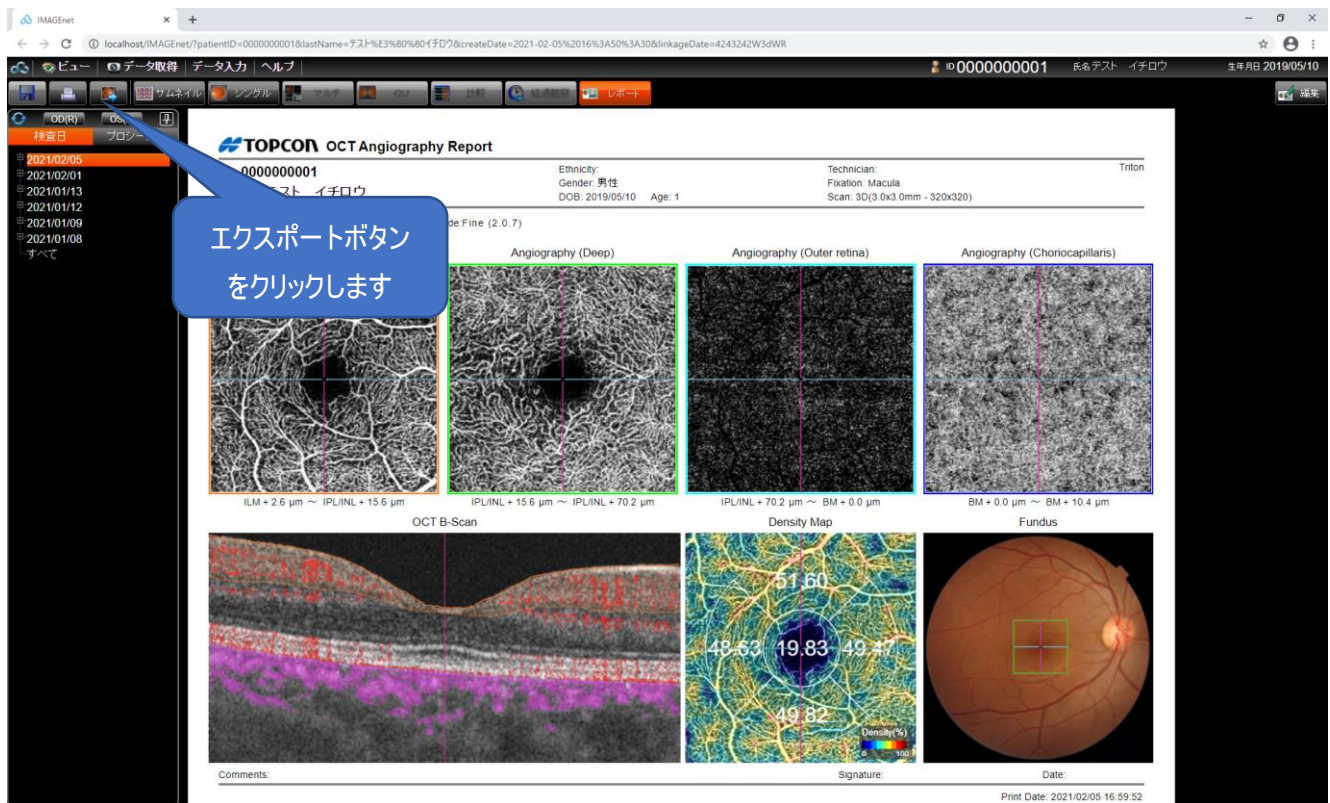

⑥ 他眼を表示する場合は、シングルボタンをクリックし単眼表示に戻ります。




⑦ 表示したい画像をダブルクリックし表示を切り替えます。

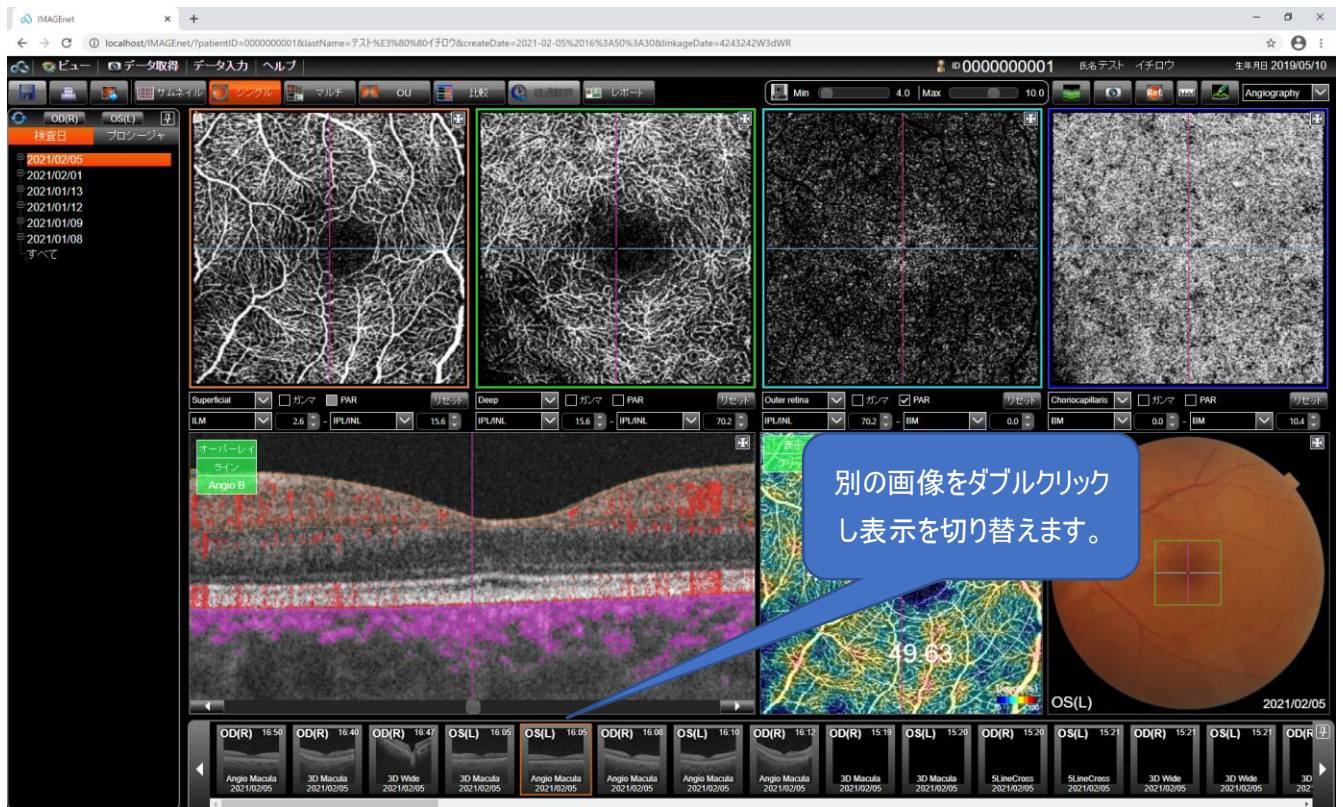

⑧ 手順④～⑥を繰り返し、他眼のレポートをエクスポートします。

⑨ エクスポートが終了したら×をクリックし IMAGEnet6 を終了します。

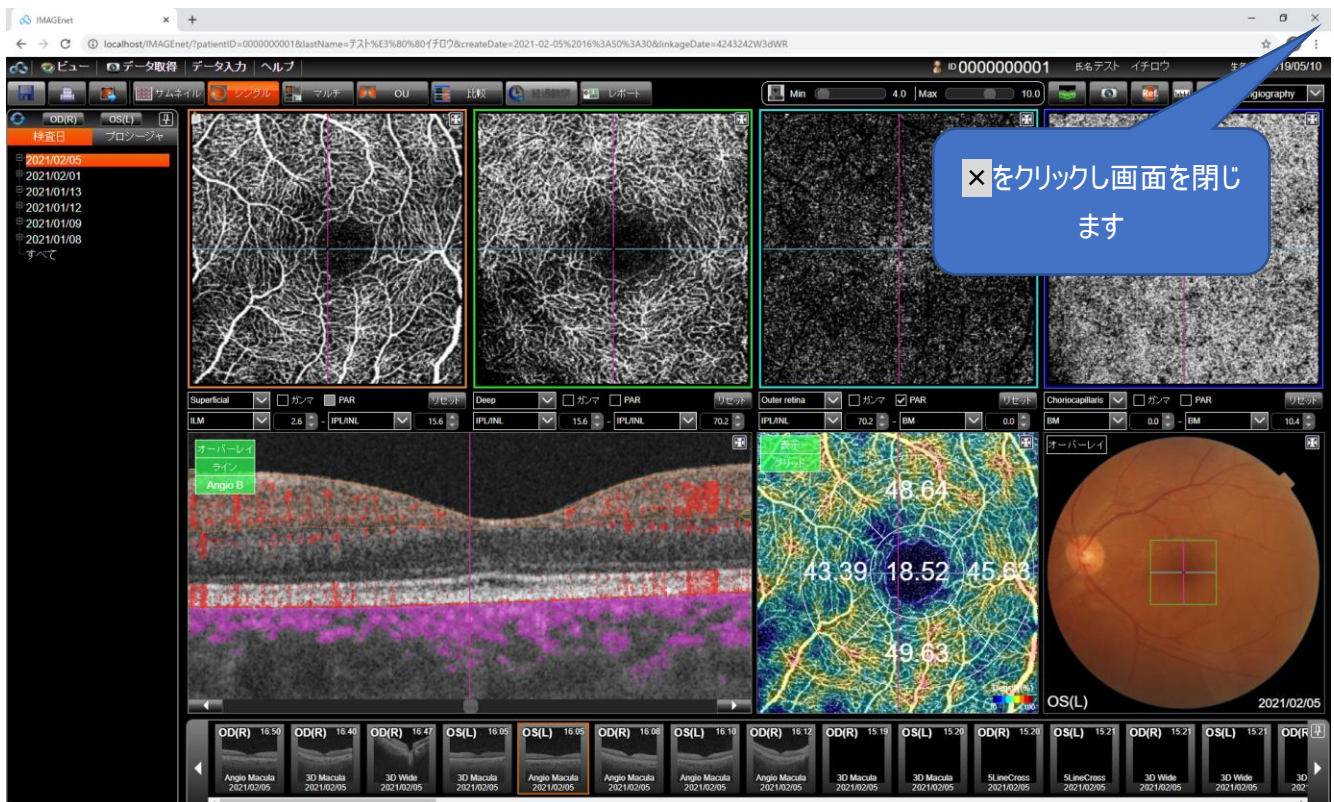

⑩ 通常の OCT 撮影画面に戻りますので、通常の手順に従い、電子カルテへ画像を送信してください。